



Praktické
a rychlé

Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholovým roztokem určené pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem.

desam® wipes

Naše Plus:

- Rychlý dezinfekční efekt
- Účinnost od 15 sekund
- Okamžitě k použití
- Dobrá materiálová snášenlivost

Oblast použití:

desam® wipes jsou určeny pro rychlou a snadnou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků, přístrojů a pomůcek odolných vůči vodě a působení alkoholu. Vhodné pro oblast zdravotnictví, ordinace lékařů, ústavy sociální péče, laboratoře, lékárny, domácí péči a obecnou praxi.

Vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a účinně dezinfikovat zdravotnické prostředky, jako např.:

- povrchy v blízkosti pacientů, kontaktní povrchy, operační stoly
- stoly, stolky, odkládací a manipulační plochy
- kliky, vozíky, madla, opěradla
- vyšetřovací křesla, pomůcky apod.

desam® wipes jsou materiálově kompatibilní s nerezovou ocelí, barevnými kovy a jejich slitinami, pochromovanými a smaltovanými povrchy, sklem, porcelánem, PVC, apod. Není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akrylát a lakované povrchy).

Návod na použití:

Předem odstraňte hrubé nečistoty. Vytáhněte ubrousek z plastické dózy a stírejte dezinfikovaný povrch. Dbejte na důkladné smočení povrchu. Nechejte zaschnout. Používejte pouze na suché a studené povrchy. Pro dezinfekci větších ploch použijte více ubrousků. Po použití dózu důkladně uzavřete. Jeden ubrousek vystačí na plochu 0,25 m². Při ošetřování zdravotnických prostředků dbejte na pokyny výrobce. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).

Použití	Expozice
Dezinfekce ploch a povrchů zdravotnických prostředků	15 s

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Účinnost	Testovací norma	Expozice
Baktericidní	EN 13727 ²	15 s
	EN 14561 ²	30 s
	EN 13697 ²	30 s
Baktericidní (MRSA)	SOP ¹	30 s
Fungicidní (C. albicans)	EN 13624 ²	15 s
Fungicidní (C. albicans , A. niger)	EN 13697, EN 14562 ²	30 s
Virucidní (BVDV, Vaccinia)	DVV/RKI ²	30 s
Virucidní (Noro)	EN 14476 ²	30 s
Virucidní (Polio, Adeno)	EN 14476 ¹	30 s
Virucidní (Rota)	SOP	30 s
Virucidní (Adeno)	DVV/RKI ²	60 s
Virucidní (Polio)	EN 14476 ²	15 min
Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)	EN 14348 ¹	30 s
	EN 14348 ²	1 min
Mykobaktericidní (M. TBC)	SOP ¹	30 s
Tuberkulocidní (M. terrae)	EN 14348 ²	30 s

desam[®] wipes

Složení:

100 g přípravku **desam[®] wipes** obsahuje následující účinné látky:

- 45 g Ethanol
- 30 g Propan-2-ol
- 0,5 g Didecyl dimethyl ammonium chlorid

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

Vzhled	čirá kapalina
Zápach (vůně)	charakteristický po alkoholu, bez parfemace
Hustota	cca. 0,85 g/cm ³ / 20 °C

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a přímého slunečního záření. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty, lakované povrchy).

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
desam [®] wipes	dóza á 100 ks ubrousků náhradní balení á 100 ks ubrousků (Rozměry ubrousku 13x22 cm)	12 12

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 1023]

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.



Součást skupiny Air Liquide.