



chirosan®

Práškový dezinfekční prostředek na bázi generované kyseliny peroxyoctové určený k dezinfekci operačního instrumentaria, pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů a povrchů zdravotnických prostředků.

Naše plus:

- Vhodný k dezinfekci a mytí nástrojů, pomůcek a vyššímu stupni dezinfekce
- 3 v 1 (enzymatická, mycí a dezinfekční složka)
- Výborné mycí vlastnosti, šetrný k nástrojům
- Dezinfekce malých povrchů (povrchy přístrojů, inkubátory, vodoléčebné vany)
- Použití také v UZV čističkách

Oblast použití:

chirosan® je určen k manuální dezinfekci a čištění nástrojů a pomůcek bezprostředně po použití ponořením do předem připraveného pracovního roztoku. Také vhodný pro dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků otřením (např. vodoléčebných van, dentálních otiskovacích hmot, anesteziologického příslušenství, inkubátorů atp.). Také je vhodný pro použití v UZV čističkách.

chirosan® je materiálově kompatibilní s běžnými materiály používanými ve zdravotnické praxi. Doporučuje se na nástroje a pomůcky z chirurgické oceli, skla, plastu, pryže, porcelánu, keramiky a plexiskla.

Není vhodný na nástroje z mosazi, mědi, hliníku a na poniklované nebo pochromované nástroje s mechanicky narušeným povrchem.

Návod na použití:

Příprava roztoku: Do dezinfekční nádoby přesně odměřte množství vody o teplotě 20 °C ±1. Vsypte odměřené množství prášku **chirosan®** dle dávkovací tabulky a důkladně zamíchejte. Po 15-ti minutové aktivaci a opětovném důkladném promíchání je roztok připraven k použití. Drobné nerozpustné částice na dně nádoby jsou žádoucí (aktivují roztok).

Nástroje určené k reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněny všechny duté části po stanovenou dobu expozice (bez vzduchových bublin). Poté se nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou vodou.

Plochy zdravotnických prostředků a pomůcek lze dezinfikovat a čistit také pomocí otěru. Silně znečištěné plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují.

Použití	Koncentrace	Expozice
Čištění a dezinfekce nástrojů a pomůcek	0,8%	30 min.
Vyšší stupeň dezinfekce	0,8%	90 min.
Dezinfekce povrchů	0,8%	15 min.
Dezinfekce otiskovacích hmot, inkubátorů	0,8%	2 min.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, virucidní (BVDV, Vaccinia, Polio, Adeno, Herpes), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní

Účinnost	Norma	Doba expozice				
		2'	15'	30'	60'	90'
Baktericidní	EN 13727, EN 14561 ²		0,8%			
Fungicidní (C. albicans)	EN 13624, EN 1650 ²		0,8%			
Fungicidní (C. albicans, A. niger)	EN 14562 ²		1,6%	0,8%		
Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)	EN 14563 ²		0,8%			
Virucidní (Adenovirus, Poliovirus)	EN 14476 ²				0,8%	
Virucidní (BVDV, Vaccinia)	DVV/RKI ¹	0,8%				
Virucidní (Herpesvirus)	DVV/RKI ¹				0,8%	
Sporicidní (B. subtilis, B. cereus)	EN 14 347 ¹				0,8%	
Sporicidní (B. subtilis)	EN 13704 ¹					0,8%

1 – nižší zátěž, 2 – vyšší zátěž

Odborné posudky a expertízy:

Testy materiálové kompatibility,
Chirurgické a stomatologické
instrumentarium: Medin a. s.

Testy materiálové kompatibility,
flexibilní endoskopy: Karl Storz

Testy inkubátory:
Státní zdravotní ústav Praha

Testy pro dentální otiskovací hmoty:
VFN – Ústav klinické a experimentální
stomatologie

Testy mikrobiologické účinnosti:
Chemila, spol. s r. o.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě



Složení:

chirosan® obsahuje následující aktivní látky:

- in situ generovaná kyselina peroxyoctová

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled zápach (vůně) hodnota pH (0,8% roztok)	bílý prášek se zelenými krystalky bez parfému 8 – 9
---	---

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
chirosan®	500 kg dóza s dávkovací lžící 2,5 kg kbelík s dávkovací odměrkou	12 1

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Důsledně dodržujte instrukce k použití. Není vhodný na nástroje z mosazi, mědi, hliníku a na poniklované nebo pochromované nástroje s mechanicky narušeným povrchem.

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIb [CE 1023]

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel
certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.



Součást skupiny Air Liquide.