

Incidin Alcohol Wipe, dezinfekční ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholovým roztokem pro rychlou a účinnou dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem.



- účinné látky: 2-propanol, 1-propanol
- dezinfekční prostředek **k přímému použití** se širokým spektrem účinnosti
- působí rychle, nezanechává zbytková rezidua (snadná manipulace šetří čas)
- materiálově kompatibilní s běžnými materiály, nevhodné na materiály citlivé na alkohol
- bez barviv a parfemace
- **oblast použití:** rychlá dezinfekce malých ploch a povrchů ve zdravotnictví, v oblasti sociální péče, v laboratořích, lékárnách, domácí péči atd.
- pouze pro profesionální použití (před použitím čtěte přiložené pokyny)

Spektrum účinnosti přípravku Incidin Alcohol Wipe


- baktericidní (účinnost proti kvasinkám), virucidní (vč. Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV) a tuberkulocidní

Doporučený způsob použití přípravku Incidin Alcohol Wipe		
Vyměňte ubrousek z dózy, plochy a předměty důkladně otřete, nechte působit po určenou dobu, následně neotírejte ani neomývejte vodou. Dózu vždy pečlivě uzavřete.		
Účinnost	Testovací metoda	Doba expozice
Dezinfekce povrchů s mechanickým účinkem	dle VAH 2015 (vč. testu dle EN 16615)	5 minut
Baktericidní, účinnost proti kvasinkám	EN 16615	1 minuta
Baktericidní	EN 13727	1 minuta
Účinnost proti kvasinkám	EN 13624	1 minuta
Tuberkulocidní	EN 14348 a EN 16615	1 minuta
Obalené viry	EN 14476	30 s
Omezeně virucidní	EN 14476	5 minut
Adeno/Noro	EN 14476	5 minut
Polyoma SV 40	EN 14476	10 minut
Rota	EN 14476	30 s
Obalené viry (vč. HIV, HBV, HCV)	dle doporučení RKI 01/2004 (DVV 2015)	30 s
Omezeně virucidní plus, Adeno, Noro	dle DVV 2015	10 minut
Rota	dle DVV 2015	30 s

Obj. číslo	Popis balení	Počet ubrousků [ks]	Rozměr ubrousku [cm]	Dostupnost	Cena / ks
900 003 309 400	Flow Pack	100	15 x 17	3-4 týdny	438 Kč
900 033 094 080	Dóza	90	15 x 17	3-4 týdny	452 Kč
900 033 094 100	Náhradní náplň pro dózu	90	15 x 17	3-4 týdny	345 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Bezpečnostní-list-Incidin-Alcohol-Wipe.pdf](#)