

## Mikrozyd AF, dezinfekční ubrousky

Zdravotnický prostředek

Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholovým roztokem určené pro rychlou a účinnou dezinfekci malých ploch a povrchů otěrem. Jsou obzvláště vhodné na lesklé povrchy a pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem.



- typ přípravku: Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 0297], Biocid
- účinné látky: propan-1-ol, ethanol
- **k přímému použití** se širokým spektrem účinku
- rychle zasychá a nezanechává zbytková rezidua
- materiálově kompatibilní s běžnými materiály
- nevhodné na materiály citlivé na alkohol (např. akryláty, plexisklo, lakované povrchy)
- **oblast použití:** rychlá dezinfekce malých ploch a povrchů (stoly, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.); obzvláště vhodné na lesklé povrchy a pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem (povrchy v blízkosti pacientů, vyšetřovny, zdravotnické prostředky apod.)
- pouze pro profesionální použití (před použitím čtěte příložené pokyny)

### Spektrum účinnosti přípravku Mikrozyd AF

- baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní



Doporučený způsob použití přípravku Mikrozyd AF

Z povrchu nebo předmětu předem odstraňte viditelné nečistoty. Plochu nebo předmět ubrouskem důkladně otřete. Pro dezinfekci větších ploch použijte více ubrousků. Po použití dózu důkladně uzavřete. Nepoužívejte na mokré a horké povrchy.

Obj. číslo	Popis balení	Počet ubrousků [ks]	Rozeř ubrousku [cm]	Dostupnost	Cena / ks
900 030 109 179	Dóza	150	14 x 18	3-4 týdny	486 Kč
900 030 109 144	Náhradní balení	150	14 x 18	3-4 týdny	357 Kč
900 030 703 093	Dóza Jumbo	220	20 x 27	3-4 týdny	544 Kč
900 030 703 094	Náhradní balení Jumbo	220	20 x 27	3-4 týdny	413 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Mikrozyd-AF-wipes.pdf
-  Bezpečnostní-list-Mikrozyd -AF.pdf